

Вы можете приобрести бандажи B.Well rehab разных серий:

PRO

Профессиональный подход к профилактике боли
Улучшает кровообращение, повышает стабильность суставов при нагрузках и после травм.

MED

Современный метод лечения боли
Стабилизирует, нормализует тонус мышц, сохраняет функцию движения. Для лечения травм и при обострении заболеваний

ORTHO

Помощь при хронических болях
Для людей с хроническими проблемами опорно-двигательной системы

CARE

Необходимая забота в ответственный период
Медицинские бандажи позволяют избежать осложнений во время беременности, до и после операций



Разработка, проверка и контроль производства продукта осуществляются B.Well Swiss AG, Швейцария. Применяемая система контроля Swiss гарантирует высокое качество, долговечность и безопасность всего семейства продуктов компании B.Well.

www.bwell-swiss.ru

B.Well 
rehab

B.Well Swiss AG,
Bahnhofstrasse 24, 9443 Widnau, Switzerland
Производитель
Би.Велл Свисс АГ
Банхофштрассе 24, 9443 Виднау, Швейцария

Место производства:
Дунгуань Парк Спорт Продактс Ко., Лтд.,
№42, Хуаньши С. Роуд, Мэйлинг Индустриальная
Зона, Цинхутоу Виллидж, Танся Таун, Дунгуань
Сити, Провинция Гуандун, Китай.

Сделано в Китае

Эксклюзивный дистрибьютор/Официальный импортер,
уполномоченная производителем организация,
принимающая претензии: АО «Альфа-Медика»,
125493, РФ, г. Москва, ул. Авангардная д. 3,
пом. 1, эт. 4, офис 2402.

Бесплатная горячая линия

8 800 200 3322



IM_W-332_RU_4_0524

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

B.Well 
rehab

Изделие протезно-ортопедическое:

Бандаж на коленный сустав **REF W-332** усиленный

Серия PRO: профессиональная профилактика боли

Бандаж на коленный сустав усиленный, арт. W-332, предназначен для профилактики травм и заболеваний коленного сустава. Рекомендуется ношение бандажа при наличии факторов риска:

- ▶ нагрузках
- ▶ переохлаждении
- ▶ после перенесенных травм или инфекционных заболеваний
- ▶ людям с генетической предрасположенностью к заболеваниям коленного сустава
- ▶ при избыточном весе
- ▶ при вращательных нагрузках

Бандаж оказывает компрессионное воздействие на коленный сустав, способствуя улучшению кровообращения, уменьшению отека и снижению болевого синдрома.

3D технология вязки стимулирует проприоцептивный контроль и усиливает стабильность сустава.

Специальные вставки в области коленного сустава повторяют сложную динамику движения при ходьбе, улучшают посадку и прилегание бандажа к телу и дают ощущение комфорта.

Спиральные ребра жесткости снижают ударные нагрузки на сустав, предупреждают смещение бандажа при движении и способствуют боковой стабилизации сустава.

Показания:

- ▶ Профилактика травм
- ▶ Уменьшение боли, отечности при травмах, растяжениях связок, ушибах
- ▶ Профилактика развития и обострения заболеваний
- ▶ После перенесенных операций
- ▶ Боковая нестабильность коленного сустава

Противопоказания:

индивидуальная непереносимость материалов.

Предупреждения:

при наличии заболеваний кожи или аллергии на компоненты, содержащиеся в составе биндажа, необходима предварительная консультация врача.

Внимание!

Слишком плотное прилегание биндажа может привести к локальному сдавливанию кожи и пережатию кровеносных сосудов и нервов.


Следует проконтролировать правильное расположение и посадку изделия.

При появлении необычных симптомов или новых жалоб следует прекратить использование изделия и незамедлительно обратиться к врачу.

Размер биндажа подбирается по окружности ноги под коленом

Для удобства подбора специалисты B.Well разработали таблицу соответствий размеров для биндажей на основании статистических данных.

Размер биндажа	Размер (мужской)	Размер (женский)	Обхват под коленом
S	46-48	44-46	27-30 см
M	48-50	46-48	30-33 см
L	50-52	48-50	33-36 см
XL	52-54	50-52	36-40 см
XXL	более 54	52-54	40-44 см



Порядок надевания:

Биндаж надеть так, чтобы спиральные ребра жесткости располагались по бокам коленного сустава.

Режим ношения:

Профилактический.

При подборе рекомендуется примерить биндаж, особенно в пограничных случаях.

Комплектность:

биндаж на коленный сустав

Состав:

40% нейлон,

25% эластик,

25% лайкра,

10% биокерамик,







вкладные усиливающие элементы

Гарантийный срок:

6 месяцев на медицинские свойства

Срок годности/службы не установлен и зависит от интенсивности эксплуатации

Правила ухода:

-  Стирать вручную
-  Температура не выше 30°C
-  Нельзя выжимать и сушить в стиральной машине
-  Химчистка запрещена
-  Нельзя отбеливать, использовать химически активные добавки
-  Не гладить. Избегайте при сушке высоких температур (прямых солнечных лучей и нагревательных приборов)

Дата производства изделия

указана на этикетке в номере партии «LOT»: первые две цифры – неделя производства, следующие четыре цифры – год производства






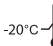
Хранить в сухом месте при комнатной температуре вдали от источников теплового излучения, прямых солнечных лучей и относительной влажности не более 70%

Соответствие стандартам

Продукция имеет Регистрационное Удостоверение Росздравнадзора РФ.

Номер и дату РУ смотрите на стикере на упаковке.

Расшифровка символов, применяемых на упаковке:

-  Обратитесь к инструкции по эксплуатации
-  Можно утилизировать вместе с бытовыми отходами
-  Производитель
-  Модель
-  Беречь от солнечных лучей
-  -20°C — 50°C Ограничение по температуре применения